

**Pour toute demande d'analyses, il est demandé aux vétérinaires temporaires de préciser le Cabinet Vétérinaire pour lequel ils réalisent les prélèvements.**

**RECOMMANDATIONS DU LABORATOIRE POUR LES ANALYSES DE PROPHYLAXIE**

**MATERIEL PRELEVEMENT**

Le matériel est fourni par le laboratoire.

La demande de matériel doit se faire au moins 1 jour ouvrable avant le ramassage :

- soit par téléphone,
- soit par fax ou par courriel (contact@agrivalys71.fr), en utilisant le document téléchargeable sur le site :

<https://www.saoneetloire71.fr/accueil/agriculture/agrivalys-71>

- Utiliser en priorité les tubes pour prise de sang avec la date de péremption la plus proche.
- Utiliser 1 aiguille par animal.

**CONDITIONS DE CONSERVATION DES TUBES DE SANG POUR ANALYSES SEROLOGIQUES**

- ETAPE 1** Après prélèvement, entreposer les tubes de sang à température ambiante à 15 °C ou 20 °C pendant quelques heures jusqu'à rétraction du caillot sanguin pour limiter l'hémolyse primaire. → Un refroidissement trop précoce ou trop brutal (ex : gel dans véhicule) empêche la formation du caillot sanguin et, est à l'origine d'une hémolyse primaire.
- ETAPE 2** Réfrigérer les tubes à une température de 5 °C à 10 °C environ jusqu'à acheminement au laboratoire pour limiter le développement bactérien. → Les bactéries sont responsables de l'hémolyse secondaire avec altération du sang (coloration noire et putréfaction).

**ETAT DES ECHANTILLONS DE SANG REÇUS AU LABORATOIRE**



**ÉCHANTILLON CORRECTEMENT EXSUDÉ (CAILLOT DE SANG + SERUM)**

Analyses réalisables :  
↳ ELISA  
↳ EAT  
↳ FC'



**ÉCHANTILLON NON EXSUDÉ ET HEMOLYSÉ (PAS DE CAILLOT + HEMOLYSE PRIMAIRE)**

Manipulation supplémentaire au laboratoire pour récupération du sérum.  
Analyses non réalisables :  
↳ EAT  
↳ FC'



**ÉCHANTILLON ALTERÉ = PUTREFACTION**

Analyses non réalisables :  
↳ ELISA  
↳ EAT  
↳ FC'

### IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS



- Identifier les tubes avec les étiquettes code-barres des DAP (Documents d'Accompagnement des Prélèvements) à coller droites dans le sens de la longueur.

### SECURITE



Merci de ne pas oublier d'aiguilles dans les boîtes, pour la sécurité du personnel.

### ENVOI DE TUBES DE SANG

Utiliser les boîtes fournies par le laboratoire et séparer physiquement les séries :

- Soit en laissant une rangée vide entre les séries.
- Soit en changeant de boîte.
- Placer le DAP dans la boîte de prélèvements correspondante.

